


Ensaio Aptima® HBV Quant

Ensaio de alvo duplo para monitorização de carga viral precisa.


Quantifique com confiança. Forneça resultados com dois alvos ao longo de um amplo intervalo linear e todos os principais genótipos do HBV.

Linearidade do Ensaio Aptima® HBV Quant em plasma e soro

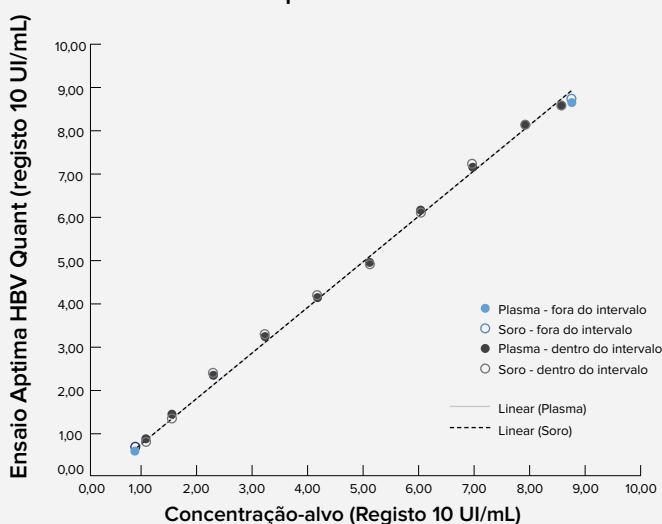


Quantifique a carga viral do HBV de valores tão baixos quanto 10 IU/mL e tão altos quanto mil milhões de IU/mL.¹

Linearidade nos genótipos do HBV – plasma

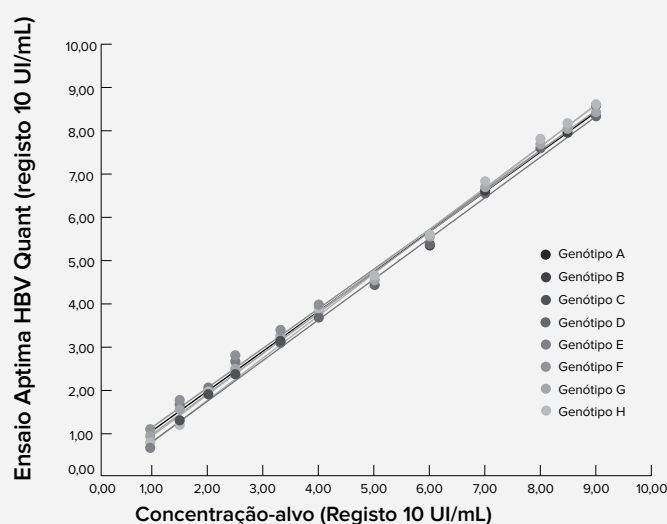

A linearidade foi validada nos genótipos A–H do HBV para uma maior confiança nos seus resultados.¹

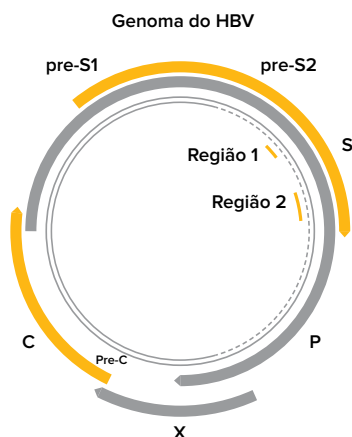

Design único e confiança absoluta em um amplo intervalo dinâmico

- Tem como alvo duas regiões muito conservadas nos genes de polimerase e superfície.
- Fornece tolerância adicional a mutações no genoma do HBV.
- Assegura uma quantificação precisa num amplo intervalo linear.

Aptima HBV
Quant Assay

O ensaio **Aptima® HBV Quant** no sistema **Panther®** combina excelente desempenho e automatização para controlo de carga viral.

Da amostra ao resultado com um único instrumento integrado

Principais características da automatização	
Acesso aleatório	Sem necessidade de criar lotes; carregue as amostras com ordens de teste diferentes à medida que chegam Execute o HBV com outros ensaios ao mesmo tempo
Processamento do tubo primário	Sem necessidade de alíquota ou transferência manual de amostras Flexibilidade de tubo: tubos PPT, ACD e EDTA validados
Carregamento flexível de amostras e reagentes	Execute vários testes a partir de uma única amostra Sem preparação manual de amostras ou cliques de códigos de barras A digitalização automatizada de códigos de barras dos tubos permite uma identificação positiva das amostras
Rápido tempo de execução com a opção de resultados estatísticos	Primeiros resultados em 2 horas, 41 minutos opção de resultados estatísticos: capacidade de priorizar resultados
Análise de QC automatizada	Gráficos Levey-Jennings para rastrear controlos e a sua tendência
Opção de baixo volume de amostras (240 µL) com fator de diluição automatizado	Fator de diluição específico aplicado automaticamente versus cálculos manuais

Informações de encomenda

Ensaio de Virologia Aptima®	Itens	Quantidade	Número de catálogo
Aptima HBV Quant Assay	Kit Ensaio Aptima HBV Quant (1 caixa de reagentes, 1 kit de calibradores e 1 kit de controlos e uma caixa de Target Enhancer Reagent)	100 Testes	PRD-03868

Tipos de tubo primário



- ✓ Plasma: EDTA, ACD, PPT
- ✓ Soro: SST, tubos de soro

EXECUTAR NO
PANTHER®



Referências: 1. Aptima HBV Quant Assay package insert, AW-13182-601, Rev. 006. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2019.

Diagnostic Solutions | Hologic.com | euinfo@hologic.com

SS-00328-IBR-PT Rev 002 © 2022 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados. Hologic, Aptima, Panther e os logótipos associados são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Hologic, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Esta informação destina-se a profissionais médicos nos EUA, não sendo destinada para solicitação ou promoção de produtos onde tais atividades sejam proibidas. Uma vez que os materiais da Hologic são distribuídos através de páginas Web, difusões eletrónicas e exposições profissionais, nem sempre é possível controlar os locais em que estes materiais estão disponíveis. Para informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda num país em particular, contacte o seu representante Hologic ou envie um e-mail para diagnostic.solutions@hologic.com.



Authorised Representative:
Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

* Número do corpo notificado, sempre que aplicável