

HOLOGIC®

GUIA DE COLHEITA E TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRAS

Expanda a testagem de doenças infecciosas com os sistemas Panther® e Panther Fusion®.



CONTINUE A CRESCER
PANTHER

		PRD-03546 Kit de Colheita de Amostras de Esfregaço Multiteste Aptima®						301040 Kit de colheita de amostra de urina Aptima	
Testes consolidados com desempenho comprovado		Vaginal, colheita pelo médico	Vaginal, autocolheita	Retal	Garganta	Meato peniano	Lesões cutâneas anogenitais ou orais	Urina masculina	Urina feminina
PRD-05576	Aptima Combo2® 100 Test	Y	Y	Y	Y			Y	Y
PRD-05571	Aptima Combo2 250 Test								
302925	Aptima CT 100 Test	Y	Y					Y	Y
302927	Aptima NG 100 Test								
		Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.						Conservar entre 2 e 30 °C até 30 dias.	
PRD-03374	Aptima Mgen 100 Test (sem calibradores)	Y	Y			Y		Y	Y
PRD-03919	Aptima Mgen 100 Test								
		Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.						Conservar entre 2 e 30 °C até 30 dias.	
303163	Aptima TV 250 Test	Y							Y
303209	Aptima TV 100 Test								
		Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.						Conservar entre 2 e 30 °C até 30 dias.	
PRD-03568	Aptima HSV 1 and 2 100 Test						Y		
		Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.							
303093	Aptima HPV 250 Test								
302929	Aptima HPV 100 Test								
303236	Aptima HPV 16 18/45 Genotype 100 Test								
PRD-05186	Aptima BV 100 testes	Y	Y						
PRD-05189	Aptima CV/TV 100 testes								
		Conservar entre 2 e 8 °C até 30 dias e entre 15 e 30 °C até 30 dias.							

Características e vantagens:

- Flexível, pode utilizar-se para colher amostras a partir de vários locais de colheita de amostras
- Elimina a necessidade de retirar e voltar a colocar a tampa manualmente de forma a reduzir erros humanos e lesões por movimentos repetitivos
- Tecnologia de tampa perfurável

301041 Aptima Unisex Swab Specimen Collection Kit		302657 Aptima Cervical Specimen Collection and Transport Kit	PRD-05110 / 301154C Aptima Specimen Transfer Kit		
Endocervical	Uretral masculino	Endocervical	Cervical ThinPrep®	Cervical Surepath	Lesões cutâneas anogenitais ou orais em meio de transporte de vírus
Y	Y		Y		
Y	Y		Y		
Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.			Conservar entre 2 e 30 °C até 30 dias antes da transferência. Após a transferência, conservar entre 2 e 8 °C até 30 dias ou entre 15 e 30 °C até 14 dias.		
Y	Y				
Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.					
Y			Y		
Conservar entre 2 e 30 °C até 60 dias.			Conservar entre 2 e 30 °C até 30 dias antes da transferência. Após a transferência, conservar entre 2 e 8 °C até 30 dias ou entre 15 e 30 °C até 14 dias.		
					Y
					Conservar entre 2 e 8 °C até 3 dias antes da transferência. Após a transferência, conservar entre 2 e 30 °C até 30 dias.
		Y	Y	Y	
		Conservar as amostras entre 2 e 30 °C até 60 dias.		Transferir a amostra dentro de 105 dias após a colheita. Antes da transferência, as amostras devem ser conservadas entre 2 e 30 °C e não mais que 30 dias em temperaturas acima de 8 °C. As amostras transferidas podem ser conservadas entre 2 e 30 °C até 60 dias.	Transferir a amostra dentro de 7 dias após a colheita. Antes da transferência, as amostras devem ser conservadas entre 2 e 25 °C. As amostras transferidas podem ser conservadas entre 2 e 25 °C até 7 dias.

- Meio não tóxico isento de guanidina
- O tampão de lise não perigoso inativa vírus respiratórios comuns, inclusive o SARS-CoV-2, pelo que reduz o risco no laboratório

Carregamento do tubo primário para confiança nos resultados	Plasma	Soro
PRD-03000 Aptima® HIV-1 Quant Dx 100 Test	Y (Quantitativo) Conservar entre 2 e 30 °C até 24 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 3 dias.	Y (Qualitativo) Conservar entre 2 e 30 °C até 24 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 5 dias.
PRD-03506 Aptima HCV Quant Dx 100 Test	Y (Quantitativo) Conservar entre 2 e 30 °C até 6 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 5 dias.	Y (Quantitativo) Conservar entre 2 e 30 °C até 6 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 5 dias.
PRD-03424 Aptima HBV Quant 100 Test	Y (Quantitativo) Conservar entre 2 e 30 °C até 24 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 5 dias.	Y (Quantitativo) Conservar entre 2 e 30 °C até 24 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 5 dias.

Soluções de transplante totalmente automatizadas	Plasma	PRD-06783 Tubos de Diluição de Sangue Total Aptima	105575 Tubos de Transferência de Amostra de Urina
		Sangue total	Urina
PRD-05074 Aptima CMV Quant 100 Test	Y (Quantitativo) Após a centrifugação, conservar entre 2 e 8 °C até 5 dias.	Y (Quantitativo) Conservar entre 15 e 30 °C até 36 horas ou entre 2 e 8 °C até 5 dias. Processar as amostras transferidas dentro de 8 horas.	
PRD-07157 Panther Fusion® EBV Quant Assay 96 Test	Y (Quantitativo) Conservar as amostras entre 2 e 30 °C até 24 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 30 °C até 24 horas ou entre 2 e 8 °C até 5 dias.	Y* (Quantitativo) Conservar as amostras não processadas entre 2 e 30 °C até 36 horas ou entre 2 e 8 °C até 5 dias. Processar as amostras transferidas dentro de 8 horas.	
PRD-07232 Panther Fusion BKV Quant Assay 96 Test	Y (Quantitativo) Conservar as amostras entre 2 e 30 °C até 24 horas antes da centrifugação. Após a centrifugação, conservar entre 2 e 30 °C até 24 horas ou entre 2 e 8 °C até 5 dias.		Y (Quantitativo) Transfira a urina do recipiente de colheita primária dentro de uma hora. Conservar as amostras processadas entre 2 e 30 °C até 24 horas ou entre 2 e 8 °C até 5 dias.

*Em desenvolvimento

Consulte **Hologic.com** para conhecer todas as condições de conservação.

	PRD-03546 Kit de Colheita de Amostras de Esfregaço Multiteste Aptima®	PRD-06951 Direct Load Capture Cap Collection Kit
Fluxo de trabalho simplificado com o kit de colheita com tampa para carga direta	Zaragatoa nasal Orofaringea	Zaragatoa nasal Zaragatoa orofaringea
PRD-06419 Aptima SARS-CoV-2 250 Test	Y Y	Y Y
PRD-06815 Aptima SARS-CoV-2/ Flu 250 Test	Conservar entre 2 e 30 °C até 6 dias.	Conservar entre 2 e 30 °C até 6 dias.

		PRD-04339 Panther Fusion® Specimen Lysis Tubes PRD-06554 Hologic Specimen Lysis Tube						
Transferência de amostra		Nasofarín-gea VTM/UTM	Nasal VTM/UTM	Orofaringea VTM/UTM	Corneto médio VTM/UTM	Lavagem/aspirado nasofaríngeo VTM/UTM	Aspirados nasais	Amostras de saliva em Meio Mínimo Essencial (MEM)
PRD-06419	Aptima SARS-CoV-2 250 Test	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
PRD-06815	Aptima SARS-CoV-2/ Flu 250 Test	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		Conservar entre 2 e 8 °C até 96 horas antes da transferência. Após a transferência, conservar entre 2 e 30 °C até 6 dias.						
PRD-07400	Panther Fusion® SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay 96 Test	Y						
PRD-04328	Panther Fusion Flu A/B/RSV Assay 96 Test	Y						
PRD-04329	Panther Fusion Paraflu assay 96 Test	Y						
PRD-04330	Panther Fusion Adv/ hMPV/RV Assay 96 Test	Y						
PRD-04868	Panther Fusion Bordetella Assay 96 Test	Y						
		Conservar entre 2 e 8 °C até 96 horas antes da transferência. Após a transferência, conservar entre 15 e 30 °C até 6 dias ou entre 2 e 8 °C até 3 meses.						
		Conservar entre 15 e 30 °C até 12 horas antes de transferir para o MEM. As amostras no MEM podem ser conservadas entre 15 e 30 °C até 2 horas antes da transferência. Após a transferência, conservar entre 2 e 30 °C até 6 dias.						



Multiteste



Urina



Unissexo



Colo do útero



Transferência

Este documento não substitui as Instruções de Utilização. Para obter uma lista de indicações, avisos e precauções, requisitos de colheita de amostras, conservação e manuseamento, consulte o folheto informativo dos dispositivos de colheita e dos ensaios Aptima em **www.hologic.com**



Hologic BV, Da Vincilaan 5,
1930 Zaventem, Bélgica

Número de Organismo Notificado sempre que aplicável
Informação do representante CE sempre que aplicável

Diagnostic Solutions | Hologic.pt | euinfo@hologic.com

SS-01170-IBR-PT Rev 001 © 2023 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados. Hologic, Aptima, Panther, Panther Fusion, ThinPrep e os logótipos associados são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Hologic, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Todas as restantes marcas comerciais, marcas comerciais registadas e nomes de produtos são propriedade dos respetivos detentores. Estas informações destinam-se a profissionais médicos e não pretendem ser uma solicitação ou uma promoção de produto nos casos em que tais atividades sejam proibidas. Uma vez que os materiais da Hologic são distribuídos através de sítios Web, difusões eletrónicas e exposições profissionais, nem sempre é possível controlar os locais em que os referidos materiais estão disponíveis. Para informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda num país em particular, contacte o seu representante Hologic local ou envie um e-mail para euinfo@hologic.com.

Aptima®