



COMBINA A TECNOLOGIA COMPROVADA DO IMAGER THINPREP® E A REVISÃO DA LÂMINA NUM ÚNICO DISPOSITIVO

Utilize a tecnologia do Imager Thinprep para normalizar a sua leitura de citologia.

Leitura Automatizada

- Cada lâmina é lida em aproximadamente 90 segundos
- Todas as células e grupo de células na lâmina são analisados
- As coordenadas dos primeiros 22 objetos maiores e mais escuros são identificadas e guardadas.

Maior comodidade


- Pode utilizar-se o microscópio de revisão como um microscópio convencional, poupando valioso espaço na bancada
- Ecrã tátil de fácil utilização, platina e controlos do microscópio ergonómicos
- O alinhamento automatizado da marca de referência poupa tempo e aumenta a precisão
- Verificações automatizadas do funcionamento após o exame para garantir a integridade dos dados

Exame


- Comporta-se como um microscópio automatizado, apresentando os 22 campos de visão
- O processo de revisão dupla combina a especialização humana com o poder da leitura computadorizada para fornecer uma solução de qualidade superior para o seu laboratório
- Se forem identificadas células anormais, é necessário examinar toda a lâmina
- Se os 22 campos de visão forem normais, a lâmina pode ser sinalizada como negativa
- Concentrando-se em casos anormais, o citologista pode rastrear mais eficientemente

ThinPrep[®]
INTEGRATED IMAGER

VISTA LATERAL

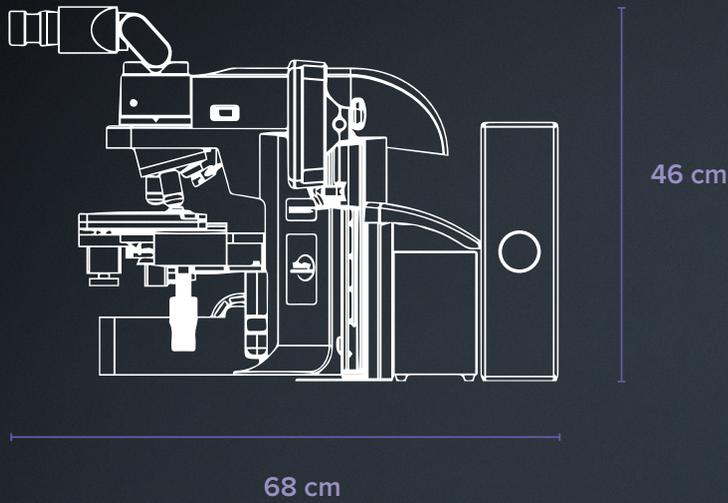

VISTA SUPERIOR

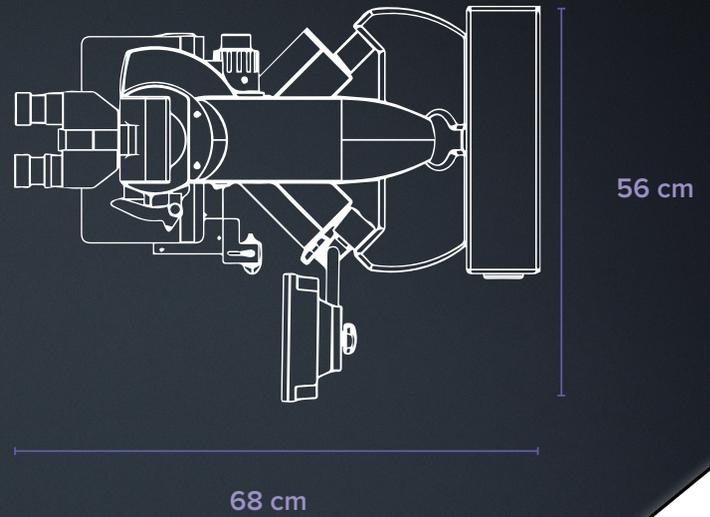

ESPECIFICAÇÕES DO IMAGER INTEGRADO THINPREP®



Dimensões	Largura: 56 cm Altura: 46 cm Profundidade: 68 cm
Peso	31 kg
Temperatura de funcionamento	16 °C – 32 °C
Humidade de funcionamento	20% - 80% de HR sem condensação
Tensão elétrica	100 – 120 V/220 – 240 V monofásica
Frequência	50 – 60 Hz +/- 10%

Diagnostic Solutions | Hologic.com | euinfo@hologic.com

PB-00484-IBR-PT Rev. 001 © 2016 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados Hologic, Science of Sure, ThinPrep, UroCyt e os logótipos associados são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Hologic, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Estas informações destinam-se a profissionais médicos e não pretendem ser uma solicitação ou uma promoção de produto nos casos em que tais atividades sejam proibidas. Uma vez que os materiais da Hologic são distribuídos através de sítios Web, podcasts e exposições profissionais, nem sempre é possível controlar os locais em que os referidos materiais estão disponíveis. Para informações específicas sobre os produtos disponíveis para venda num país em particular, contacte o seu representante Hologic ou envie um e-mail para euinfo@hologic.com.

